

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШКОЛА БУБНОВА»**

105037, г. Москва, Измайловский пр-зд, д. 10, корп. 4, кв. 13, ИНН: 9719001899
Тел: 8-963-653-97-82 www.spas01.ru mimsr1@yandex.ru

В.Г. Бубнов

**ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ
ЖГУТА ВРАЧА БУБНОВА
«АЛЬФА»**

Комплект из 4-х цветных плакатов



**Москва
2023**

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ
ЖГУТА ВРАЧА БУБНОВА «АЛЬФА»

1

УСАДИТЬ

пострадавшего
и положить
раненую руку себе
на плечо.



НЕЛЬЗЯ!

Накладывать жгут на опущенную руку.

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВРАЧА БУБНОВА «АЛЬФА»

Вертикальные борозды позволяют:

- не повреждать артерии и нервы;
- **накладывать жгут на голую кожу;**
- эффект «сцепления» обеспечивает самофиксацию от обратного хода.



2

НАЛОЖИТЬ

жгут на поднятую руку.



Каждый последующий виток ленты жгута следует **накладывать на предыдущий.**

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВРАЧА БУБНОВА «АЛЬФА»

3

ЗАВЕСТИ

петлю-застежку
за свободный край ленты жгута.

4

УБЕДИТЬСЯ

В отсу́тствии пульса
на лучевой артерии.



НЕЛЬЗЯ!

Оставляя жгут на руке
при наличии пульса на лучевой артерии.

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВРАЧА БУБНОВА «АЛЬФА»

5

НАЛОЖИТЬ

на рану стерильную повязку.

6

ВЛОЖИТЬ

записку о времени наложения жгута.

7

ЗАФИКСИРОВАТЬ

руку косынкой или одеждой.



Если прибытие медицинского персонала ожидается в течение нескольких часов?

Через каждые 30 минут снимать жгут на 20–30 секунд.