

105037, г. Москва, Измайловский пр-зд, д. 10, корп. 4, кв. 13, ИНН: 9719001899
Тел: 8-963-653-97-82 www.spas01.ru mimsr1@yandex.ru

В.Г. Бубнов

Правила ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОВШОВЫХ НОСИЛОК

комплект из 4-х заламинированных
учебных плакатов

Художники:
В. Бубнов, А. Еремин



Москва
2023

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВШОВЫХ НОСИЛОК

Ковшовые носилки обеспечивают самый щадящий способ перекладывания пострадавших с тяжелыми травмами с земли на вакуумный матрас или медицинский подкат, **что значительно снижает тяжесть осложнений травматического шока.**

1

РАЗЪЕДИНИТЬ

КОВШИ НОСИЛОК.



ВНИМАНИЕ!

Ковши носилок следует разъединять на земле, **в одной горизонтальной плоскости.**

2

СОЕДИНИТЬ

КОВШИ НОСИЛОК
ПОД ПОСТРАДАВШИМ.



ВНИМАНИЕ!

лежать на ковшовых носилках можно
не более 2-х минут.

3

ПЕРЕНЕСТИ

пострадавшего на вакуумный матрас и, разъединив ковши носилок, убрать их в сторону.



ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения травм участников оказания помощи **следует избегать проноса ковшей над головой помощника.**